

Hamburger Rettungstuch / EVATEX

Rettungs- und Evakuierungstuch für pflegebedürftige Personen

Die Gefahr von Bränden in Pflegeeinrichtungen wird häufig unterschätzt. Statistiken zeigen, dass in Deutschland beinahe wöchentlich ein ernstzunehmender Brand in einem Krankenhaus oder einem Seniorenwohnheim ausbricht.

Das **Hamburger Rettungstuch / EVATEX** dient zur horizontalen sowie vertikalen Rettung bzw. Evakuierung von bettlägerigen Personen aus dem akuten Gefahrenbereich.

Diese Tücher befinden sich unter jeder Bettmatratze. Die Personen werden im Einsatzfall mit denen, sich am Rettungstuch befindlichen Gurten gesichert. **Ein Helfer** zieht die Einheit Tuch/Matratze/Patient aus dem Bett, über den Flur und ggf. über das Treppenhaus in den nächstgelegenen **Brandabschnitt**.

Die Pflicht zur Vorhaltung von entsprechenden Rettungsmitteln liegt nicht bei der Feuerwehr, sondern beim Träger der Einrichtung.

Nach einem Brandausbruch oder bei Rauchentwicklung dürfen die Aufzüge zur Patientenrettung oder Evakuierung nicht mehr genutzt werden. Betten können nicht über Absätze oder Treppen geschoben werden.

Funktionierende Evakuierungskonzepte sind gesetzlich vorgeschrieben. Eine unzureichende Vorbereitung kann zum Organisationsverschulden und damit zu massiven Regressansprüchen führen.

Das Hamburger Rettungstuch / EVATEX im Überblick

- Das Rettungstuch liegt permanent zwischen Bettgestell und Matratze
- Das Rettungstuch wird als Schleiftuch verwendet
- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen / Pflegematratzen
- Sichere Bedienung durch nur eine Person
- Gleitfähig auf allen Unterlagen (auch auf nassem Untergrund)
- Tuchstoff, Bänder und Schnallen bestehen zu 100 % aus Polyester
- Zugfestigkeit der Bänder von 500 kg
- Waschbar bei 95°
- Temperaturbeständigkeit von 105 C° über 10 Min. für thermische Desinfektionsverfahren
- Mit den gängigen Bettendesinfektionsmitteln desinfizierbar
- Notwendige Zugkraft bei einem 80 kg wiegenden Patient und einer 174 cm großen ziehenden Person entspricht 24-26 kg
- CE geprüft nach DIN EN 1865

Unser Ansprechpartner vor Ort:

Golchert Brandschutz

Im Nordtal 20
34537 Bad Wildungen
info@golchert-brandschutz.de

Tel: 05621 - 71644

Fax: 05621 - 91529

www.golchert-brandschutz.de



Abb. 1: (Sichern des Patienten)



Abb.2: (Einheit Tuch/Matratze/Patient)



Abb. 3: (Rettung aus Gefahrenbereich)



Abb.4: (Rettung über Treppenhaus)

Aus unserem Hamburger Rettungstuch wird:



Bewährte Qualität; neuer Name